

業務用

# 電動式ベッド

【1モータータイプ】

EB-1026

## 取扱説明書

枕付

正面

側面

固定用突起



リモート  
コントローラー付

この度は「電動式ベッド」をお買いあげ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さいますようお願い申し上げます。

- 万が一この取扱説明書を紛失または汚損した場合は、お買い求めの販売店にお問合せ下さい。
- 本取扱説明書の一部または全部を無断転載することは法律で禁止されています。
- 本取扱説明書の内容は将来予告無しに変更されることがあります。
- 本取扱説明書は万全を期しておりますが、万が一ご不審な点や記載漏れなどのお気づきの点が御座いましたら、弊社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。

### 安全にお使い頂くために必ずお読み下さい

この取扱説明書は、あなたやお客様、他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使い頂くために、守って頂きたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。表示の内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

#### 警告表示の意味



危険

この表示は、取り扱いを誤った場合「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示しています。



警告

この表示は、取り扱いを誤った場合「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。



注意

この表示は、取り扱いを誤った場合「障害を負う可能性および、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示しています。

#### 図記号の意味



△記号は「警告を含む注意」を促す内容があることを告げる物です。図の中には具体的な注意内容が書かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げる物です。図の中や近傍に具体的な禁止内容が書かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げる物です。図の中に具体的な指示内容が書かれています。

#### 負責事項について

- 火災、地震暴動、戦争、テロなどの行為、その他事故等、お客様の故意、又は過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社はいっさい責任を負いません。
- 本製品の使用又は使用不能から生じる付随的な障害（事業利益の損失・事業の中断による障害）に関して、当社はいっさい負担を負いません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方により生じた損害に関して、当社はいっさいの責任を負いません。

## 2 使用前・使用後の取り扱いについて

### 警告



- ベッドの上で立ち上がらないで下さい。
- 本体および付属品の分解・改造をしないで下さい。
- 各部にがたつき、緩みを感じたら、直ちに使用を中止し、販売店にご相談下さい。


## 3 使用方法

〈高さ調節の方法（電動）〉

- 1 付属のリモートコントローラーで、上下ボタンを押して頂き、調整してください。

【リモートコントローラー】

上げる 下げる

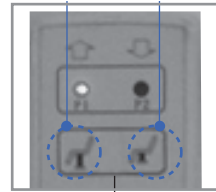

高さ調節ボタン

【電動高さ調節機能】



〈リクライニング調節の方法（手動）〉

- 1 お好みの高さを持ち上げます。ストッパーにしっかりと固定されているか確認してください。
- 2 下げる時はストッパーを上を持ち上げて下げます。

ストッパー



### 警告



- 本製品は「1人」用です。マッサージ施術等で2人乗るような使い方はしないで下さい。
- ベッド稼動時、ベッドに手や足など近づけないで下さい。「骨折」「切り傷」など怪我のおそれがあります。

### 注意



- 小さなお子様のいる環境でご使用の際は、小さなお子様だけで操作できないように、使用しないときはコンセントを抜いてください。

## 4 設置場所・お手入れ方法

- 1 直射日光が当たらない、かつ、操作するのに十分な広さのある場所に設置して下さい。
- 2 お手入れには水と中性洗剤を使い、洗剤を使う場合は十分に拭き取って下さい。

### 注意




- 直射日光の当たる場所に設置されますと、表皮の変色やひび割れの原因となります。
- 湿度の高い場所に設置されますと「錆」発生の原因となります。
- お手入れにシンナーやベンジン等の石油系有機溶剤が使われますと、表皮の変色やひび割れの原因となります。
- お手入れ時の中性洗剤が表面に残っていると、「腫れ」「かぶれ」の原因となる事があります。

## 5 仕様

- サイズフラット時/W190×D83×H55~71cm
- 重さ/52kg ●電源/100V ●出力/55W
- 仕様/1モータータイプ、枕付、手元コントローラー付、電動高さ調節機能付、手動リクライニング機能付、PULゼー

販売店：

# 保証書

品名・品番		
保証期間		納品日から1年間
納品日		年 月 日
お客様	お名前	様
	ご住所	〒  TEL ( )
販売店	株式会社 TRYBEST 〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田3-1-9 Tel.050-5539-8030 Fax.042-633-0190 	

【 本書は再発行いたしませんので、保証内容をよくお読みいただいた後、  
納品伝票とともに大切に保管してください。 】

## 無料保証規定

取扱説明書の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- 1 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 2 お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 3 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
- 4 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- 5 レザー類の破れ、変色、消耗パーツの劣化、磨耗、錆、変質、その他類似
- 6 本書のご提示がない場合
- 7 発送修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。  
また、出張修理を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 8 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 9 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、修理窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については修理窓口にお問い合わせください。

## ▲ 注意 消耗品について

当製品本体部分には1年間の保証がついておりますが、パーツの破損に関しましてはご購入後1年以内であっても消耗品扱いとなります。

各パーツは強い力や無理な力が加わりやすくと破損するおそれがありますので注意してお取扱ください。

ご不明な点は販売店までお問い合わせください。

## サービスセンター窓口

- 万一故障の際は下記の販売店へご連絡ください。 ●

株式会社 TRYBEST

〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田3-1-9

E-Mail : info@trybest.jp FAX : 042-633-0190

050-5539-8030